

Instrucciones de instalación del retenedor Rocket

Materiales necesarios:

*Microondas (1100 vatios)

*Toallas de papel

*Plato apto para microondas

PASO 1: Preparación

Enrolle la mitad de una toalla de papel húmeda y colóquela entre los canales del retenedor. Esto ayudará a evitar que las paredes del retenedor se deformen en el microondas.

PASO 2: Colocación

Coloque otra toalla de papel húmeda doblada sobre el plato apto para microondas con las paredes del retenedor hacia arriba. Luego, cubra el retenedor con otra toalla de papel húmeda.

PASO 3: Calentar

Coloque el plato en el microondas (1100 vatios) y caliéntelo durante 40 segundos a potencia alta.

PASO 4: Retirar y enfriar

Retire el plato del microondas y colóquelo en una zona de trabajo amplia. Retire con cuidado todas las toallas de papel del retenedor y déjelo reposar sobre el plato de 3 a 5 segundos. Nota: Las toallas de papel pueden estar calientes. No se apresure. PASO 5: Moldeado

Coloque el retenedor en sus dientes superiores o inferiores y cierre suavemente la boca. No muerda. Presione firmemente los labios alrededor del retenedor y cree succión durante 2 minutos. Simultáneamente, presione los dedos contra los labios y la lengua contra la parte posterior del retenedor para que se adapte a sus dientes.

PASO 6: Ajuste final

El ajuste final se completa después de dos minutos. Puede mantener el retenedor en la boca o guardarlo en su bolsa. El retenedor continuará encogiéndose lentamente durante las siguientes 24 horas, creando un ajuste perfecto y personalizado.